

A Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos, em acordo com as determinações da Instrução Normativa IN nº 04 de 2012, disponibiliza as Instruções de Uso de seus produtos em formato eletrônico para download, através do site do fabricante - endereço eletrônico: [www.microdent.ind.br](http://www.microdent.ind.br)

**IMPORTANTE:** Para correta identificação do arquivo desejado, atentar-se para a Revisão da Instrução de Uso e seu nº ANVISA informados no rótulo do produto adquirido.

Caso o usuário tenha interesse em receber as Instruções de Uso em formato impresso, estas poderão ser solicitadas, sem custo de emissão e envio, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor: +55 (16) 3610-7666, ou pelo e-mail: [microdent@microdent.com.br](mailto:microdent@microdent.com.br)

Instrução de Uso disponível em: [www.microdent.ind.br](http://www.microdent.ind.br)

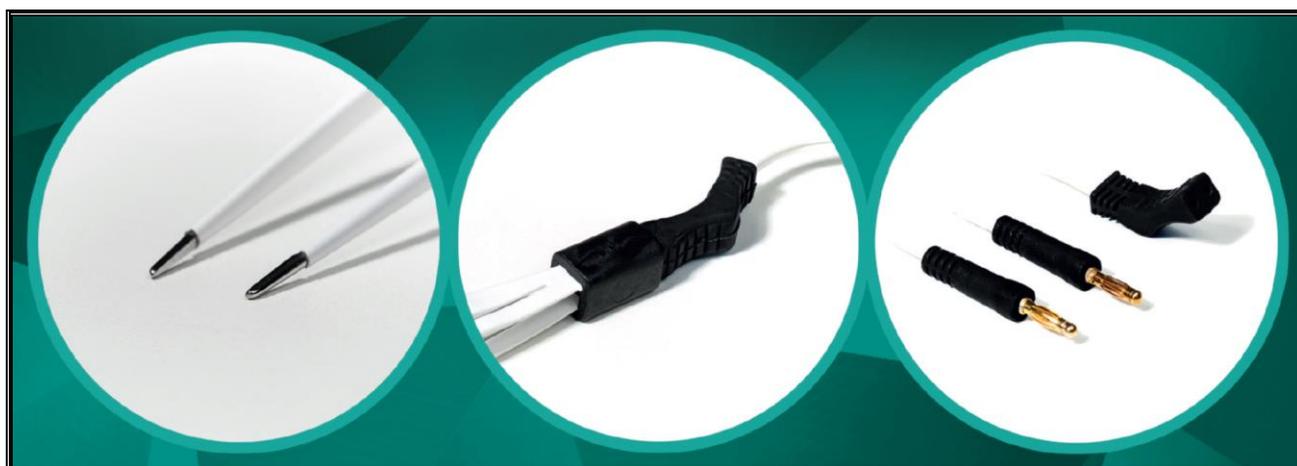
**Versão:** MAN.22.048

**Código de Referência:** 01034000050

**Revisão:** 04

**Registro ANVISA nº:** 10309310057

## INSTRUÇÕES DE USO



# Pinça Bipolar DISSECT MAXX

**PRODUTO ESTÉRIL – O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

**MAN.22.048 - 01034000050 - REV. 04 - DEZEMBRO/2023**

## ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO .....	3
2.	INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO .....	3
2.1.	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO .....	3
3.	ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	4
4.	APRESENTAÇÃO.....	5
5.	ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DO PRODUTO .....	30
5.1.	PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO .....	30
5.2.	INSTRUÇÕES DE USO .....	31
5.3.	INSTALAÇÃO E USO .....	31
6.	PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE O USO DO PRODUTO.....	32
6.1.	NA UTILIZAÇÃO .....	32
6.2.	NO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO .....	33
6.3.	PROCEDIMENTO DE INUTILIZAÇÃO E DESCARTE .....	33
7.	PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A ESTERILIZAÇÃO DO PRODUTO .....	34
8.	COMPATIBILIDADE – GERADORES ELETROCIRÚRGICOS.....	35
9.	RECLAMAÇÕES DO CLIENTE .....	36
9.1.	SIMBOLOGIA.....	36
10.	FABRICANTE .....	37
11.	TERMOS DE GARANTIA.....	37

## 1. INTRODUÇÃO

Prezado cliente, a empresa Microdent® agradece a opção pelos nossos produtos, os quais foram desenvolvidos dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetados para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança.

Este manual irá lhe fornecer detalhes importantes e gerais do produto adquirido, orientando para o uso adequado, assim como na solução de pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer.

**ATENÇÃO:** *Para maior segurança:* Ler atentamente todas as instruções contidas neste manual, antes do uso do produto.

**Observação:** Todos os operadores devem estar cientes das instruções contidas neste manual.

**A pinça bipolar DISSECT MAXX é fornecida estéril. O fabricante recomenda o USO ÚNICO do produto, devendo ser completamente descartado após a utilização.**

## 2. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO

<b>Nome Técnico:</b> Cabo/Eletrodo Eletrocirúrgico (Potencia Maior que 50W)
<b>Nome Comercial:</b> Pinça Bipolar - DISSECT MAXX
<b>Registro ANVISA nº:</b> 10309310057
Enquadramento de acordo com a RDC 751 de 2022 ANVISA – Regra 9 / Classe III

### 2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

As Pinça Bipolar - DISSECT MAXX, fabricadas pela Microdent® são uma família de produtos descartáveis, de USO ÚNICO (recomendável pelo fabricante), destinadas ao apoio em procedimentos cirúrgicos com a finalidade de: coagulação dissecação; corte; ou de fulguração eletro-cirúrgica. São utilizadas em cirurgias mais delicadas, como: microcirurgias, cirurgias vasculares, e neurocirurgias.

As Pinça Bipolar - DISSECT MAXX são fornecidas unitariamente em embalagem tipo blister, fabricada em PET (Politereftalato de Etileno) e em embalagem terciária de Papel Cartão Tríplice Plastificado, envolvida e selada com Plástico Filme em Polietileno de Baixa Densidade Termo Encolhível.

- **Cada unidade de embalagem contém:**
  - ✓ **Família DISSECT MAXX com Cabo:**
    - ↳ 01 unidade – Pinça Bipolar;
    - ↳ 01 unidade – Cabo Descartável.
  - ✓ **Família DISSECT MAXX sem Cabo:**
    - ↳ 01 unidade – Pinça Bipolar.
  - ✓ **Acessório de uso exclusivo:**
    - ↳ 01 unidade – Cabo DISSECT MAXX.

Todas as embalagens são adesivadas com um rótulo que identifica claramente o produto como ESTÉRIL.

Para todos os modelos comerciais da Pinça Bipolar - DISSECT MAXX o fabricante recomenda USO ÚNICO, devendo ser descartados após o uso.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte. Cabe exclusivamente ao cirurgião, a seleção do modelo comercial da Pinça Bipolar - DISSECT MAXX mais adequada para cada procedimento cirúrgico.

**ATENÇÃO:** O gerador eletro-cirúrgico, NÃO é objeto deste registro e a escolha fica a critério do cirurgião (vide item **8. COMPATIBILIDADE – GERADORES ELETROCIRÚRGICOS** deste manual).

**O produto deve ser manuseado por profissionais habilitados com conhecimentos nas técnicas e protocolos envolvidos no procedimento.**

### 3. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A “**Pinça Bipolar**” é fabricada em Aço Inoxidável AISI 420 com revestimento em Poliamida, e com Acabamento em Copolímero de Poliactal Natural.

Na forma de uma pinça de dissecação, sua parte ativa na ponta distal funciona como um eletrodo, e a ponta proximal apresenta conectores. Constam de segmento rígido com vários tamanhos, formas e pontas, os quais definem o tipo e o código do produto, formando uma família de produtos médicos.

Como acessório da “**Pinça Bipolar**”, tem disponível o “**Cabo DISSECT MAXX**” em Silicone, com 03 (três) metros de comprimento, comercializado separadamente. Acessório este, de uso exclusivo com o produto.

O produto é comercializado individualmente, fornecido na condição montado, pronto para uso, e esterilizado por Óxido de Etileno (ETO).

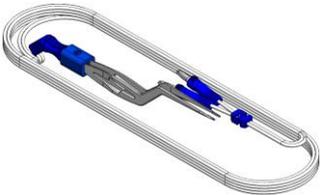
**O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO, descartável. Não recomendável reutilizar e/ou reesterilizar o produto.**

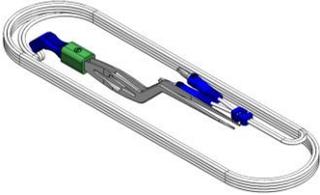
**ATENÇÃO:** NÃO acompanham esse produto: nenhum material implantável.

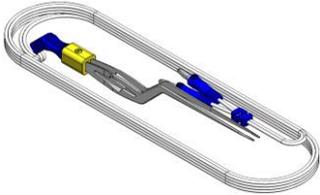
#### 4. APRESENTAÇÃO

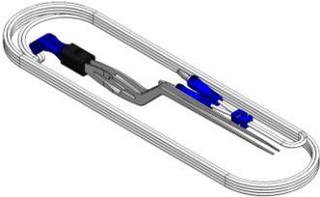
A Pinça Bipolar - DISSECT MAXX apresenta-se nas seguintes dimensões que permitem o profissional escolher o modelo mais adequado conforme o caso clínico:

#### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA RETA – C/ CABO

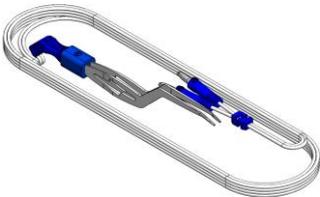
PINÇA: Baioneta 16 cm		PONTA: Reta	CABO: Aplicável
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA	
32010000001	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000006	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000011	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000016	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000021	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000026	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

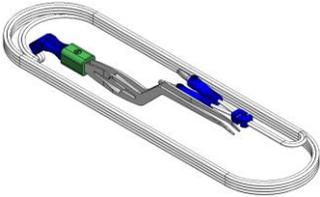
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000031	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000036	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000041	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000046	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000051	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000056	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

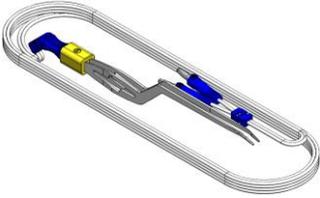
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000061	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000066	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000071	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000076	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000081	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000086	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

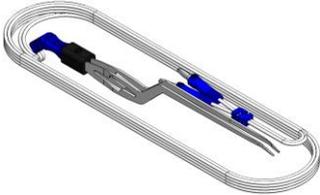
<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000091	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000096	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000101	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000106	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000111	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000116	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA P/ BAIXO 15° – C/ CABO

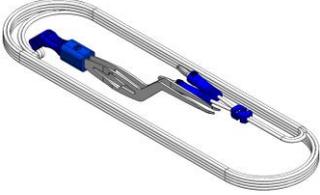
<b>PINÇA:</b> Baioneta 16 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 15°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000002	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000007	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000012	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000017	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000022	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000027	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

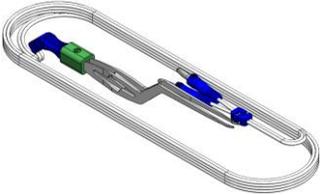
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 15°		<b>CABO:</b> Aplicável	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000032	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000037	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000042	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000047	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000052	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000057	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado				

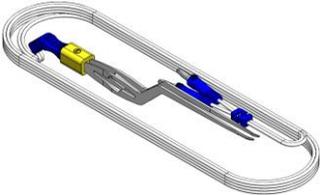
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 15°		<b>CABO:</b> Aplicável	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000062	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000067	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000072	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000077	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000082	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000087	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável				
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado				

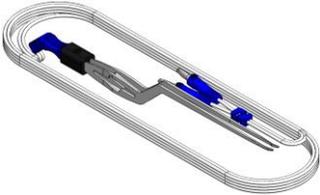
<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 15°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000092	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000097	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000102	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000107	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000112	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000117	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 15° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA P/ CIMA 15° – C/ CABO

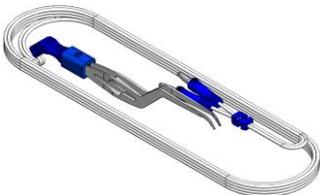
<b>PINÇA:</b> Baioneta 16 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 15°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000003	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000008	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000013	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000018	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000023	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000028	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

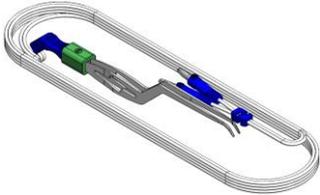
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 15°		<b>CABO:</b> Aplicável	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000033	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000038	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000043	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000048	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000053	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000058	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado				

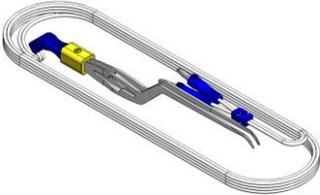
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 15°		<b>CABO:</b> Aplicável	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000063	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000068	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000073	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000078	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000083	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
32010000088	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável				
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado				

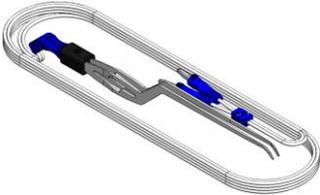
<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 15°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000093	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000098	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000103	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000108	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000113	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
32010000118	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 15° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA P/ BAIXO 45° – C/ CABO

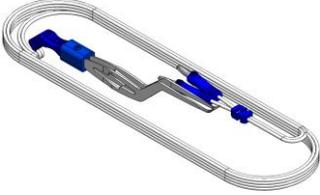
<b>PINÇA:</b> Baioneta 16 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 45°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000004	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000009	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000014	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000019	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000024	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000029	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

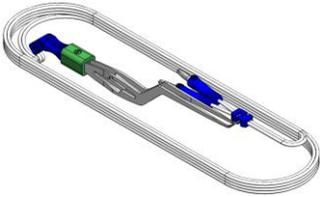
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 45°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000034	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000039	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000044	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000049	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000054	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000059	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

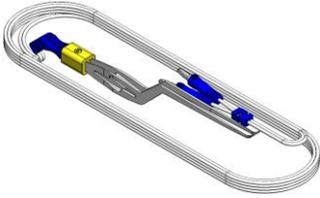
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 45°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000064	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000069	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000074	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000079	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000084	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000089	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

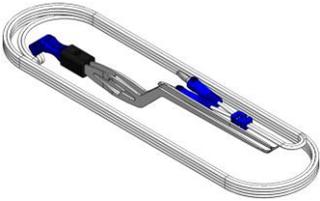
<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 45°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000094	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000099	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000104	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000109	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000114	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000119	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 45° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA P/ CIMA 45° – C/ CABO

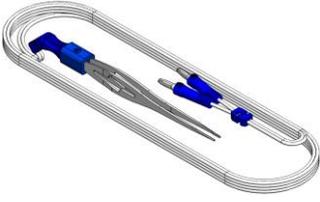
<b>PINÇA:</b> Baioneta 16 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 45°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000005	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000010	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000015	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000020	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000025	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000030	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

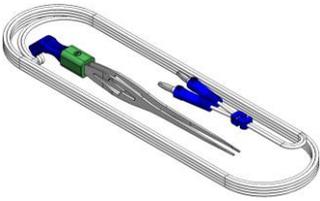
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 45°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000035	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000040	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000045	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000050	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000055	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000060	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

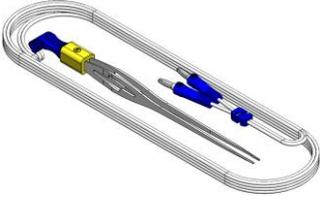
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 45°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000065	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000070	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000075	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000080	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000085	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000090	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 45°	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000095	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000100	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000105	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000110	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000115	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
32010000120	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 45° c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

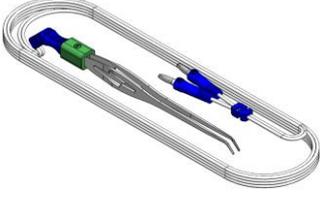
### DISSECT MAXX – RETA – PONTA RETA – C/ CABO

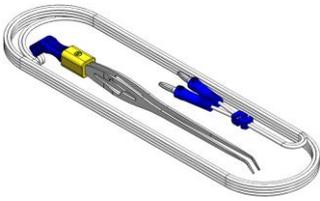
<b>PINÇA:</b> Retta 16 cm		<b>PONTA:</b> Retta	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000121	DISSECT MAXX - Retta 16 cm Ponta 0.7 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000122	DISSECT MAXX - Retta 16 cm Ponta 1.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000123	DISSECT MAXX - Retta 16 cm Ponta 1.5 mm c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

<b>PINÇA:</b> Reta 18 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000127	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 0.7 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000128	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 1.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000129	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 1.5 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000130	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 2.0 mm c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

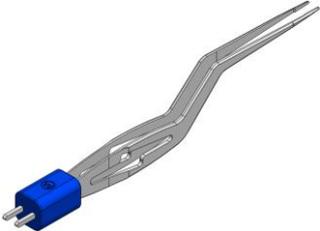
<b>PINÇA:</b> Reta 20 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000134	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 1.0 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000135	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 1.5 mm c/ Cabo - Descartável		
32010000136	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 2.0 mm c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

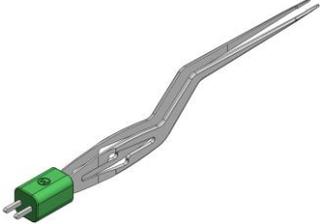
### DISSECT MAXX – RETA – PONTA CURVA – C/ CABO

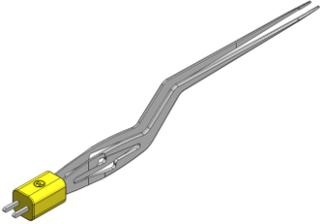
<b>PINÇA:</b> Reta 18 cm		<b>PONTA:</b> Curva	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000124	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 1.0 mm Curva c/ Cabo - Descartável		
32010000125	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 1.5 mm Curva c/ Cabo - Descartável		
32010000126	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 2.0 mm Curva c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

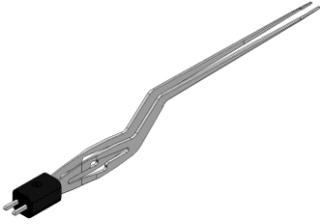
<b>PINÇA:</b> Reta 20 cm		<b>PONTA:</b> Curva	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000131	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 1.0 mm Curva c/ Cabo - Descartável		
32010000132	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 1.5 mm Curva c/ Cabo - Descartável		
32010000133	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 2.0 mm Curva c/ Cabo - Descartável		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420 <b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado		

### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA RETA – S/ CABO

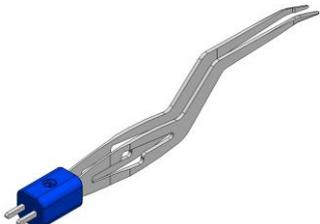
<b>PINÇA:</b> Baioneta 16 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000137	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm		
32010000142	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm		
32010000147	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm		
32010000152	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm		
32010000157	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm		
32010000162	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

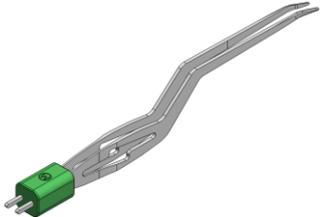
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000167	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm		
32010000172	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm		
32010000177	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm		
32010000182	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm		
32010000187	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm		
32010000192	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

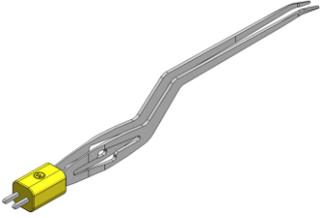
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000197	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm		
32010000202	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm		
32010000207	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm		
32010000212	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm		
32010000217	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm		
32010000222	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000227	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm		
32010000232	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm		
32010000237	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm		
32010000242	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm		
32010000247	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm		
32010000252	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA P/ BAIXO 15° – S/ CABO

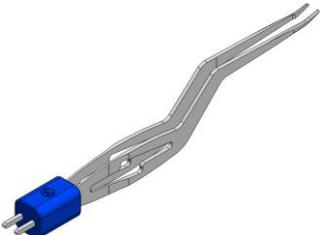
<b>PINÇA:</b> Baioneta 16 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 15°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000138	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 15°		
32010000143	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 15°		
32010000148	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 15°		
32010000153	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 15°		
32010000158	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 15°		
32010000163	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 15°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

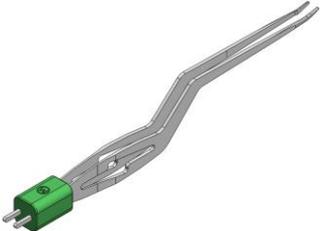
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 15°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000168	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 15°		
32010000173	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 15°		
32010000178	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 15°		
32010000183	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 15°		
32010000188	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 15°		
32010000193	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 15°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

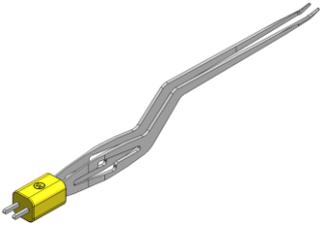
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 15°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000198	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 15°		
32010000203	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 15°		
32010000208	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 15°		
32010000213	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 15°		
32010000218	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 15°		
32010000223	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 15°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

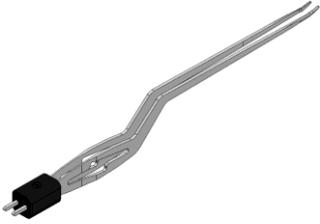
<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 15°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000228	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 15°		
32010000233	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 15°		
32010000238	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 15°		
32010000243	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 15°		
32010000248	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 15°		
32010000253	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 15°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA P/ CIMA 15° – S/ CABO

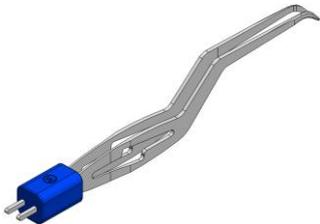
<b>PINÇA:</b> Baioneta 16 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 15°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000139	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 15°		
32010000144	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 15°		
32010000149	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 15°		
32010000154	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 15°		
32010000159	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 15°		
32010000164	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 15°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

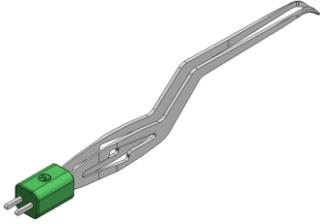
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 15°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000169	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 15°		
32010000174	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 15°		
32010000179	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 15°		
32010000184	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 15°		
32010000189	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 15°		
32010000194	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 15°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

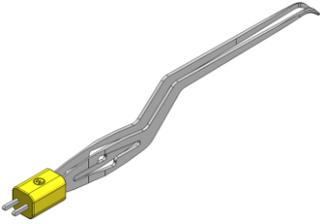
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 15°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000199	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 15°		
32010000204	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 15°		
32010000209	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 15°		
32010000214	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 15°		
32010000219	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 15°		
32010000224	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 15°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 15°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000229	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 15°		
32010000234	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 15°		
32010000239	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 15°		
32010000244	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 15°		
32010000249	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 15°		
32010000254	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 15°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA P/ BAIXO 45° – S/ CABO

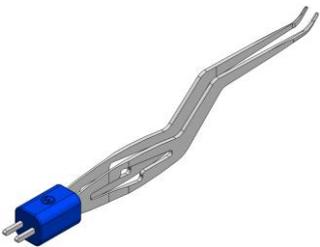
<b>PINÇA:</b> Baioneta 16 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 45°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000140	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 45°		
32010000145	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 45°		
32010000150	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 45°		
32010000155	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 45°		
32010000160	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 45°		
32010000165	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 45°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

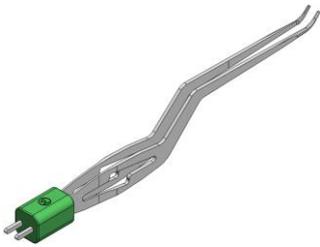
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 45°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000170	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 45°		
32010000175	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 45°		
32010000180	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 45°		
32010000185	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 45°		
32010000190	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 45°		
32010000195	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 45°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

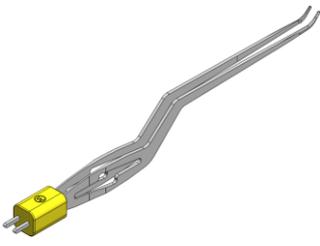
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 45°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000200	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 45°		
32010000205	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 45°		
32010000210	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 45°		
32010000215	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 45°		
32010000220	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 45°		
32010000225	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 45°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

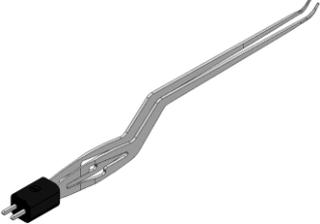
<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> p/ Baixo 45°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000230	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm p/ Baixo 45°		
32010000235	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm p/ Baixo 45°		
32010000240	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm p/ Baixo 45°		
32010000245	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm p/ Baixo 45°		
32010000250	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm p/ Baixo 45°		
32010000255	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm p/ Baixo 45°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

### DISSECT MAXX – BAIONETA – PONTA P/ CIMA 45° – S/ CABO

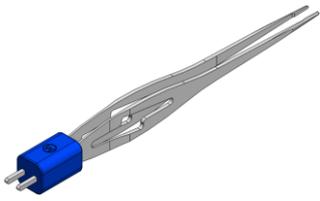
<b>PINÇA:</b> Baioneta 16 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 45°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>	
32010000141	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 45°		
32010000146	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 45°		
32010000151	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 45°		
32010000156	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 45°		
32010000161	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 45°		
32010000166	DISSECT MAXX - Baioneta 16 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 45°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

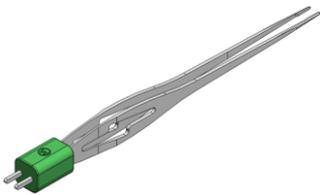
<b>PINÇA:</b> Baioneta 18 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 45°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000171	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 45°		
32010000176	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 45°		
32010000181	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 45°		
32010000186	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 45°		
32010000191	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 45°		
32010000196	DISSECT MAXX - Baioneta 18 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 45°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

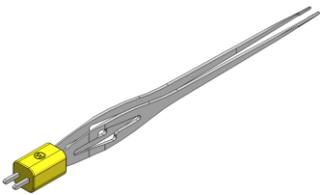
<b>PINÇA:</b> Baioneta 20 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 45°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000201	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 45°		
32010000206	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 45°		
32010000211	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 45°		
32010000216	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 45°		
32010000221	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 45°		
32010000226	DISSECT MAXX - Baioneta 20 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 45°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

<b>PINÇA:</b> Baioneta 22 cm		<b>PONTA:</b> p/ Cima 45°	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000231	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.4 mm p/ Cima 45°		
32010000236	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 0.7 mm p/ Cima 45°		
32010000241	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.0 mm p/ Cima 45°		
32010000246	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 1.5 mm p/ Cima 45°		
32010000251	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.0 mm p/ Cima 45°		
32010000256	DISSECT MAXX - Baioneta 22 cm Ponta 2.5 mm p/ Cima 45°		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

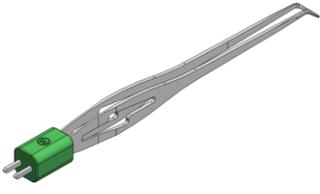
### DISSECT MAXX – RETA – PONTA RETA – S/ CABO

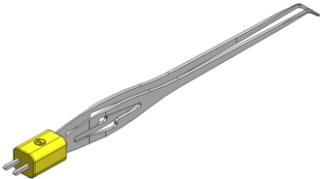
<b>PINÇA:</b> Retta 16 cm		<b>PONTA:</b> Retta	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000257	DISSECT MAXX - Retta 16 cm Ponta 0.7 mm		
32010000258	DISSECT MAXX - Retta 16 cm Ponta 1.0 mm		
32010000259	DISSECT MAXX - Retta 16 cm Ponta 1.5 mm		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

<b>PINÇA:</b> Reta 18 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000263	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 0.7 mm		
32010000264	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 1.0 mm		
32010000265	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 1.5 mm		
32010000266	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 2.0 mm		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

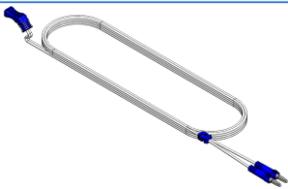
<b>PINÇA:</b> Reta 20 cm		<b>PONTA:</b> Reta	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000270	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 1.0 mm		
32010000271	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 1.5 mm		
32010000272	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 2.0 mm		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

### DISSECT MAXX – RETA – PONTA CURVA – S/ CABO

<b>PINÇA:</b> Reta 18 cm		<b>PONTA:</b> Curva	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000260	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 1.0 mm Curva		
32010000261	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 1.5 mm Curva		
32010000262	DISSECT MAXX - Reta 18 cm Ponta 2.0 mm Curva		
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420		

<b>PINÇA:</b> Reta 20 cm	<b>PONTA:</b> Curva	<b>CABO:</b> Não Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000267	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 1.0 mm Curva	
32010000268	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 1.5 mm Curva	
32010000269	DISSECT MAXX - Reta 20 cm Ponta 2.0 mm Curva	
<b>MATERIAL</b>	<b>Pinça:</b> Aço Inoxidável AISI 420	

### DISSECT MAXX – CABO

<b>PINÇA:</b> Não Aplicável	<b>PONTA:</b> Não Apic.	<b>CABO:</b> Aplicável
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>
32010000273	Cabo DISSECT MAXX	
<b>MATERIAL</b>	<b>Cabo:</b> Polímero (Elastômero Termoplástico, Silicone, PVC, Poliamida 6.6 com 30% Fibra de Vidro), Cobre, e Latão Cromado	

**Os componentes são acondicionados na mesma embalagem, sendo:**

**Embalagem Primária:** Blister Interno

**Matéria-Prima:** Polietileno Tereftalato (PET)

**Selagem:** Papel Tyvek

**Embalagem Secundária:** Blister Externo

**Matéria-Prima:** Polietileno Tereftalato (PET)

**Selagem:** Papel Tyvek

**Embalagem Terciária:** Caixa de Papel Cartão Tríplex Plastificado

**Matéria-Prima:** Papel Cartão

**Selagem:** Plástico Filme em Polietileno de Baixa Densidade Termo Encolhível



**O fabricante recomenda o USO ÚNICO, devendo ser completamente descartado após a utilização.**

## 5. ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DO PRODUTO

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos. A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

Produto comercializado individualmente, fornecido na condição montado, estéril, pronto para uso, e esterilizado por Óxido de Etileno (ETO).

**O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO, DEVENDO SER COMPLETAMENTE DESCARTADO APÓS A UTILIZAÇÃO.**

### 5.1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A Pinça Bipolar – DISSECT MAXX foi desenvolvida para uso em conjunto com geradores cirúrgicos em procedimentos de:

- ✓ Coagulação;
- ✓ Dissecação;
- ✓ Corte;
- ✓ Fulguração Eletro-cirúrgicas.

As pinças são conectadas aos geradores cirúrgicos através de cabos com conectores, e quando há o fechamento de suas pontas, uma corrente circula entre um eletrodo ativo e outro de dispersão (retorno), elevando a temperatura do tecido para realizar funções como:

- ✓ Vaporização (corte);
- ✓ Fulguração (coagulação);
- ✓ Dissecação (secagem térmica).

**ATENÇÃO:** O gerador eletro-cirúrgico, NÃO é objeto deste registro e a escolha fica a critério do cirurgião (vide item **8. COMPATIBILIDADE – GERADORES ELETROCIRÚRGICOS** deste manual).

## 5.2. INSTRUÇÕES DE USO

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada. Somente utilize o produto com a embalagem intacta e dentro do prazo da validade de esterilização (informação que consta na embalagem).

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, e dessa forma, cabe ao mesmo à escolha do método a ser empregado, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas, protocolos cirúrgicos e critérios médicos adequados. Os procedimentos de preparo, posicionamento e assepsia do paciente devem ser obedecidos.

Este produto não apresenta contraindicações, desde que utilizado de maneira correta. A utilização do produto é inerente à formação profissional.

## 5.3. INSTALAÇÃO E USO

- Abrir a embalagem;
- Tirar a **“Pinça Bipolar”** da embalagem adotando técnicas assépticas;
- Ler o manual de instrução do gerador eletro-cirúrgico, para inserir de maneira adequada o plugue do **“Cabo DISSECT MAXX”** no receptáculo do gerador eletro-cirúrgico;
- Conectar a **“Pinça Bipolar”** ao **“Cabo DISSECT MAXX”** certificando-se de que os pinos fiquem totalmente assentados nos receptáculos do **“Cabo DISSECT MAXX”**. Desta maneira, garante-se que a conexão ficará à prova de respingos. O **“Cabo DISSECT MAXX”** deve ser colocado de modo a evitar o contato com o paciente ou com outros condutores. Os eletrodos ativos que não estiverem sendo usados por algum tempo, devem ser guardados isolados do paciente;

→ Quando devidamente instalada, a **“Pinça Bipolar”** deve ser aplicada no tecido para a realização da coagulação.

**ATENÇÃO:** Ao trocar a **“Pinça Bipolar”**, certifique-se de que a mesma esteja desligada do gerador, ou que o mesmo esteja na posição **DESLIGADO \ STAND BY**.

## 6. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE O USO DO PRODUTO

**O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO, DEVENDO SER COMPLETAMENTE DESCARTADO APÓS A UTILIZAÇÃO.**

**ATENÇÃO:** O gerador eletro-cirúrgico, NÃO é objeto deste registro e a escolha fica a critério do cirurgião (vide item **8. COMPATIBILIDADE – GERADORES ELETROCIRÚRGICOS** deste manual).

### 6.1. NA UTILIZAÇÃO

- ✓ Utilize o produto apenas se a embalagem estiver lacrada e sem sinais de violação;
- ✓ Utilize o produto somente dentro do prazo de validade;
- ✓ NÃO utilize o produto se a embalagem tiver qualquer sinal de violação ou umidade;
- ✓ NÃO utilize o produto com prazo de validade vencido;
- ✓ Produto fornecido ESTÉRIL;
- ✓ Produto esterilizado por óxido de etileno (ETO);
- ✓ **O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**, devendo ser completamente descartado após a utilização;
- ✓ **Não recomendável reutilizar e/ou reesterilizar o produto;**
- ✓ Caso a embalagem esteja violada ou danificada e/ou o prazo de validade esteja vencido, o produto deve ser inutilizado e descartado, mesmo que aparente estar em boas condições;
- ✓ O produto NÃO possui nenhum componente ou material implantável;
- ✓ Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas, protocolos cirúrgicos e critérios médicos adequados;
- ✓ A Microdent® não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com consequências ao paciente, em função de utilizações impróprias;
- ✓ Armazenar em local seco e longe da umidade e do calor excessivo, isento de contaminação particulada (poeira e sujidades);
- ✓ Não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos;

- ✓ Transportar e manter o produto em sua embalagem original até o momento do uso;
- ✓ Evitar quedas e impactos;
- ✓ Contraindicações: Não se aplica;
- ✓ Efeitos adversos: Não se aplica.

**ATENÇÃO:** O gerador eletrocirúrgico, NÃO é objeto deste registro e a escolha fica a critério do cirurgião (vide item **8. COMPATIBILIDADE – GERADORES ELETROCIRÚRGICOS** deste manual).

## 6.2. NO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

A Pinça Bipolar - DISSECT MAXX deve ser transportada em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada, molhada ou perfurada.

Devem ser transportados em ambientes limpos, secos e frescos, isentos de umidade e calor excessivo e ao abrigo de poeiras e sujidades, de forma a assegurar a integridade do produto e de sua embalagem, evitando danos ou alterações às mesmas. Evitar quedas e impactos.

O produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado, armazenado em local seco e longe da umidade e do calor excessivo, isento de contaminação particulada (poeira e sujidades) e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO	
TEMPERATURA	10 °C a 55 °C
UMIDADE RELATIVA	10% a 70%

## 6.3. PROCEDIMENTO DE INUTILIZAÇÃO E DESCARTE

Antes do descarte, este produto deve ser inutilizado até estar claramente identificado que está impróprio para o uso, e para que não possa ser reaproveitado. Após a inutilização, deverá ser descartado de acordo com procedimento da área hospitalar.

A Microdent<sup>®</sup> não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com consequências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação do mesmo, de acordo com suas características originais.

## 7. PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A ESTERILIZAÇÃO DO PRODUTO

A Pinça Bipolar - DISSECT MAXX fabricada pela Microdent® é fornecida unitariamente, na condição ESTÉRIL, em embalagem duplo blister, fabricada em PET (Politereftalato de Etileno), e em embalagem terciária de Papel Cartão Tríplice Plastificado, sendo o método utilizado para sua esterilização, a exposição do dispositivo ao Óxido de Etileno (ETO) em câmara apropriada e previamente validada.

A esterilização da Pinça Bipolar - DISSECT MAXX por Óxido de Etileno segue os parâmetros e procedimentos estabelecidos na: UNE-EN 550:1995, “*Sterilization of Medical Devices – Validation and Routine Control of Ethylene Oxide Sterilization*”.

A rotulagem da Pinça Bipolar - DISSECT MAXX identifica claramente o produto como ESTÉRIL, assim como o tipo de esterilização aplicado ao produto, e apresenta todas as informações legais pertinentes, que garantem a completa identificação e rastreabilidade do dispositivo médico.

Para manter a esterilidade, o produto médico deverá ser aberto somente no momento da utilização e manuseado em ambientes estéreis. Antes do uso, verifique a data de vencimento da esterilização. Não utilize o produto caso a embalagem primária e/ou secundária estejam violadas, ou o prazo de validade da esterilização esteja vencido.

Antes do uso, verifique a data de vencimento da esterilização. Não utilize o produto caso o prazo de validade da esterilização esteja vencido, as informações da rotulagem não estejam legíveis, ou as embalagens: primária, secundária, e/ou terciária estejam violadas.

Caso receba o produto com prazo de validade da esterilização vencido ou com as embalagens primária e/ou secundária violadas, o cirurgião deve comunicar o fabricante sobre o ocorrido e NÃO deve utilizar o dispositivo. Este dispositivo deve ser marcado como impróprio para uso, e descartado de acordo com a legislação sanitária vigente.

**O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).**

**Prazo de Validade:** 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

**Produto estéril.** Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

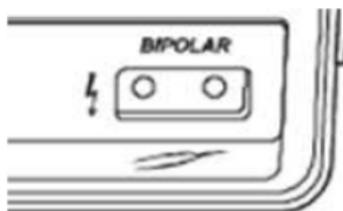
**O Fabricante Recomenda Uso Único.** Produto descartável.

## 8. COMPATIBILIDADE – GERADORES ELETROCIRÚRGICOS

Como mencionado, a Pinça Bipolar - DISSECT MAXX foi desenvolvida para uso em conjunto com geradores cirúrgicos. A “**Pinça Bipolar**” é conectada ao “**Cabo DISSECT MAXX**” e em seguida ao gerador cirúrgico para poder funcionar.

**ATENÇÃO:** O gerador eletro-cirúrgico, NÃO é objeto deste registro e a escolha fica a critério do cirurgião.

Esclarecemos que os geradores eletro-cirúrgicos, que tiverem o padrão de encaixe Bipolar, como mostra a figura a seguir, serão compatíveis com as “**Pinça Bipolar**” e com o “**Cabo DISSECT MAXX**”.



Gerador Eletro-cirúrgico com padrão de encaixe Bipolar.

**Informações Importantes:** A **Pinça Bipolar - DISSECT MAXX** deve ser utilizado somente em gerador eletro-cirúrgico certificado pelo INMETRO, e que possua Registro na ANVISA/MS.

Para utilização da **Pinça Bipolar - DISSECT MAXX**, o gerador eletro-cirúrgico deve possuir as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Modo/Função Bipolar;
- ✓ Conexão de Entrada Bipolar;
- ✓ Ajuste de Potência.

A Microdent<sup>®</sup>, fabricante da **Pinça Bipolar - DISSECT MAXX** recomenda que não sejam ultrapassados os limites de potência de trabalho indicados abaixo:

- **Potência Máxima de Corte:** 100W
- **Potência Máxima de Coagulação:** 50W

**OBSERVAÇÃO:** Não utilize a **Pinça Bipolar - DISSECT MAXX**, com potência do gerador de tensão, que excedam tensão RF pico-a-pico de 800V.

Desta forma, garantimos que a “**Pinça Bipolar**” e o “**Cabo DISSECT MAXX**” são compatíveis com os seguintes geradores eletro-cirúrgicos disponíveis no mercado brasileiro:

DESCRIÇÃO – FABRICANTE		Nº REGISTRO ANVISA
01	GERADOR BISTURI ELÉTRICO – SÖRING	10171610057
02	GERADORES ELETROCIRÚRGICOS DE ALTA FREQUÊNCIA – DELTRONIX	10214670023
03	GERADOR ELETROCIRÚRGICO ESG-400 – OLYMPUS	80124630197
04	BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO SS 200E – WEM	10247670035
05	BISTURI ELETRÔNICO BP-150 – TRANSMAI	80052640010
06	BISTURI ELETRÔNICO POWERCUT LED – MEDICAL	10232100042

## 9. RECLAMAÇÕES DO CLIENTE

Efeitos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados a Microdent® com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento.

Recomenda-se informar também o número de registro do produto. Estas informações constam nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham a embalagem do produto. Todas as ocorrências notificadas a Microdent® são recebidas pelo Departamento de Tecnovigilância e submetidas à avaliação do Comitê Técnico para investigação. Ao término da investigação, uma carta resposta é elaborada pelo Departamento de Tecnovigilância para informar ao cliente se a reclamação é procedente ou não, e no caso de procedência da reclamação, a carta informa quais providências serão tomadas. Não é esperada a ocorrência de efeitos adversos na utilização deste produto.

### 9.1. SIMBOLOGIA



Data de fabricação



Validade



Manter afastado da chuva



Consultar as instruções para utilização



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Limite de umidade



Limite de temperatura



Manter afastado da luz solar



Frágil, manusear com cuidado



Código do lote



Não reutilizar



Esterilizado utilizando óxido de etileno (ETO)

## 10. FABRICANTE

### **Microdent® Aparelhos Médicos e Odontológicos Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 – Vila Virginia, CEP: 14030-430

Ribeirão Preto – São Paulo – Brasil

Fone: +55 (16) 3625 5595

[www.microdent.ind.br](http://www.microdent.ind.br) – [microdent@microdent.com.br](mailto:microdent@microdent.com.br)

**Responsável Técnico:** Eng. José Marcelo Lima da Silva

**CREA/SP:** 5069519453

## 11. TERMOS DE GARANTIA

1. A garantia se limita à substituição de peças com defeito de fabricação, devidamente constatados pela Assistência Técnica Microdent®.
2. **PERDA DA GARANTIA:** A garantia será nula quando houver danos causados pelo armazenamento inadequado ou sinais de violação, manuseio ou operação incorreta, ou ainda, quando a causa do defeito for provocada por quedas ou batidas.
3. O produto defeituoso deve ser encaminhado somente ao fabricante, Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos LTDA.
4. Despesas de taxas e fretes de peças serão de responsabilidade exclusiva do comprador (cliente final), mesmo no período de garantia, desde que, o defeito tenha ocorrido por mau uso do produto ou se o comprador não seguir corretamente as instruções do manual.
5. Para solicitação da garantia, é indispensável à apresentação da nota fiscal de compra pelo consumidor final, caso contrário, a garantia extingue-se automaticamente.

---

**ATENÇÃO:** Para requerimento de garantia o produto deve ser encaminhado de forma completa, incluindo partes danificadas. Se o produto não for encaminhado completo não será possível fazer a análise, pois não é possível averiguar a causa do dano. **Produtos enviados de forma incompleta NÃO serão cobertos pela garantia.**

**Enviar a cópia da Nota Fiscal de compra juntamente com o produto quando requerer a Garantia.**